

Alkohol (Äthanol) im Serum/Plasma

Zwecke.)

M: 1 ml Serum oder Plasma (EDTA-/
od. Heparin-). Möglichst gekühlt (4 °C).

H: Bis 14 Tage bei 4 °C.

Einfrieren nicht möglich

N: unter 0,1‰

T: spektralanalytisch; NWG: 13 mg/dl
(= 0,13‰), MBG: 13 - 300 mg/dl

I: V. a. akuten Alkoholismus. (Nur bei medizini-
scher Indikation, nicht für forensische

E: Alkoholische Desinfektionsmittel sollen bei
der Blutentnahme vermieden werden.
Ersatzweise Sublimat-(Oxycyanat-)Lösung ver-
wenden.

Für nicht-forensische Zwecke dürfte auch das
Trocknenlassen (5 Min.) der Alkohol-Desinfek-
tion ausreichen.