

Retikulozyten

M: 3 ml EDTA-Blut. Ist ein Transport der Probe ins Labor innerhalb 5 Std. nicht möglich, so zwei mit Brillantkresylblau gefärbte Ausstriche einsenden, ggf. Arbeitsvorschrift E beachten.

N: 5 - 15‰ (auf 1000 Erythrozyten)

T: Brillantkresylblau

I: V. a. überstürzte Erythrozytenneubildung bzw. Insuffizienz des Markorgans

E: Vorgegebenes Vol. der EDTA-Röhrchen genau auffüllen, oder: 50 µl Brillant-Kresylblau-Lg und 50 µl EDTA-Blut mischen, 30 Min. stehen lassen (Z. T.), mischen, auf fettfreiem Objektträger dünnen Blutausstrich anfertigen, lufttrocknen.