

Sporenpäckchen, Sporenstreifen

M: Testkuverts, in denen sich Sporenstreifen mit Sporen von *Bacillus stearothermophilus* und *Bacillus subtilis* (globigii) befinden.

Bitte in meiner Praxis anfordern.

N: kein Wachstum

I: Überprüfung von Sterilisatoren

E: Vorzugsweise 2 Testkuverts in die Mitte umfangreichen Sterilisiergutes legen und routinemäßig mitsterilisieren. Nach Entnahme aus dem Sterilisator unter Angabe der Sterilisationsart (Hochdruckdampf- Heißluft- Äthylenoxidgas) zusammen mit einem weiteren, nicht sterilisierten einsenden. Letzteres dient im bakteriol. Labor insbes. als Transportkontrolle.)