

Madenwurm (Enterobius vermicularis)

M: Klebestreifen-Abklatsch-Präparat (Objektträger mit transparentem Klebestreifen (z. B. Tesafilm[®]) in Versandhülle.

T: Mikroskop

I: V. a. Madenwurmbefall

E: Ein transparenter Klebestreifen wird morgens (vor dem Waschen und vor dem ersten Stuhlgang) auf die Perianalregion gedrückt und wieder abgezogen.

Der Klebestreifen wird anschließend auf einen Objektträger aufgedrückt und in eine Objektträger-Versandhülle gegeben.

Zur Diagnose und Therapiekontrolle sind mindestens drei Klebestreifenpräparate, jeweils an aufeinander folgenden Tagen gewonnen, erforderlich, da von den Weibchen nicht an jedem Tag Eier abgelegt werden.