

Gastrin

M: 1 ml Serum, kein Plasma

4 °C bis 4 Std. danach tiefgefrieren

H: Bei Lagerung der Seren im Kühlschrank (2 - 8 °C) kommt es zu einer schnellen Abnahme der Gastrin-Konz., die im Mittel bei 25% pro Woche liegt.

N: Bis 90 pg/ml

ZES: 130 - 1500 pg/ml

Achlorhydrie: 50 - 1500 pg/ml

T: RIA (DA, PEG); Testvol. 200 µl

I: V. a. Zollinger-Ellison-Syndrom (ZES) oder gastrinbildende Tumoren (Tumormarker)

E: Blutentnahme nüchtern nach 10 Std. Nahrungskarenz.

Nach kurzer Gerinnungszeit Blut schnellstmöglich abzentrifugieren. Serum portioniert einfrieren.

Patient vorzugsweise in Praxis !